

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

# СИСТЕЙН®

## Средство офтальмологическое

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03787  
от 18 марта 2009 года

### ОПИСАНИЕ

Систейн® средство офтальмологическое – стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400 0,4%, пропиленгликоль 0,3%, гидроксипропилгуар 0,17%-0,20%, кислоту борную 1%, кальция хлорид 0,0053%, магния хлорид 0,0064%, калия хлорид 0,13%, натрия хлорид 0,1%, цинка хлорид 0,00015%, ПОЛИКВАД® (хлорид полидрония) 0,001%, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную (до объема 100%).

### ПОКАЗАНИЯ

Систейн® средство офтальмологическое увлажняет, обеспечивает длительный комфорт и временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как сухость, раздражение, чувство жжения, чувство инородного тела или песка, вызванных пылью, дымом, ультрафиолетовыми лучами, сухим жаром (радиатор, сауна), кондиционером, ветром, косметикой, мерцанием длительно работающего телевизора или монитора компьютера.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам Систейн® средства офтальмологического.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Систейн® средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня для увлажнения и увеличения комфорта глаз. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте. Систейн® средство офтальмологическое может быть использовано до и после ношения контактных линз для увлажнения роговицы.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

### ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

### ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Храните флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке. ⏰
- Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Не используйте раствор, если упаковка вскрыта или повреждена. 🚫

### ФОРМА ВЫПУСКА

Систейн® средство офтальмологическое выпускается во флаконах по 3-15 мл.

СТЕРИЛЬНО.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Алкон Нузи С.А., Испания  
Alcon Cusi S.A.  
Camil Fabra, 58,  
08320 El Masnou, Barcelona, Spain

### Владелец регистрации на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:

Россия, 109004, Москва, ул. Николаямская, 54  
Тел. (495) 961-13-33



[www.systane.ru](http://www.systane.ru)