

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

СИСТЕЙН®

БАЛАНС

СРЕДСТВО
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10489
от 08 сентября 2011 года

ОПИСАНИЕ

СИСТЕЙН® БАЛАНС средство офтальмологическое – стерильный раствор, 1 мл которого содержит пропиленгликоль 6,0 мг; гидроксипропилгуар 0,5 мг; LIPITECH™ систему: минеральное масло 10 мг, димиристоил фосфатидилглицерол 0,05 мг; полиоксил 40 стеарат 3,8 мг; сорбитан тристеарат 2,9 мг; кислоту борную 10,0 мг; сорбитол 7,0 мг; динатрия эдетат 0,25 мг; ПОЛИКВАД® (поликватерний-1) 0,01 мг; кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH); воду очищенную (до объема 1 мл).

ПОКАЗАНИЯ

СИСТЕЙН® БАЛАНС средство офтальмологическое на масляной основе увлажняет поверхность глаза, стабилизирует липидный слой слезной пленки и уменьшает испарение слезной жидкости. Обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перед применением флакон встряхивать!
СИСТЕЙН® БАЛАНС средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.
СИСТЕЙН® БАЛАНС средство офтальмологическое может использоваться для устранения симптомов синдрома «сухого глаза», вызванного ношением контактных линз, путем закапывания в каждый глаз до надевания и после снятия контактных линз.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Храните флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

ФОРМА ВЫПУСКА

СИСТЕЙН® БАЛАНС средство офтальмологическое выпускается во флаконах по 3 мл, 5 мл, 10 мл и 15 мл.

Производитель:

Алкон Кузи С.А., Испания
Alcon Cusí, S.A.
Camil Fabra, 58,
08320 El Masnou, Barcelona, Spain

Владелец регистрации на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:
Россия, 109004, Москва, ул. Николаямская, 54
Тел. (495) 961-13-33