

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

СИСТЕЙН® ГЕЛЬ

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2012/11762
от 20 марта 2012 года

ОПИСАНИЕ

Систейн® Гель средство офтальмологическое – стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400 4,0 мг/мл, пропиленгликоль 3,0 мг/мл, гидроксипропилгуар 7,0 мг/мл, сорбитол 14,0 мг/мл, аминометилпропанол 5,7 мг/мл, борную кислоту 3,0 мг/мл, калия хлорид 1,2 мг/мл, натрия хлорид 1,0 мг/мл, динатрия эдетат 0,25 мг/мл, ПОЛИКВАД® (поликватерний-1) 0,01 мг/мл, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную.

ПОКАЗАНИЯ

Систейн® Гель средство офтальмологическое применяется для снятия симптомов синдрома «сухого глаза» (от умеренной до тяжелой степени выраженности), таких как дискомфорт, жжение и раздражение.

Систейн® Гель смазывает и восстанавливает глазную поверхность, защищая ее от дальнейшего повреждения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам Систейн® Гель средства офтальмологического.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перед применением флакон встряхивать!

Систейн® Гель средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня, а также в ночное время. Систейн® Гель средство офтальмологическое может использоваться для снятия симптомов синдрома «сухого глаза», ассоциированного с ношением контактных линз. Систейн® Гель применяется до надевания и после снятия контактных линз для увлажнения роговицы. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Храните флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке. ☒
- Не используйте раствор более 3 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

ФОРМА ВЫПУСКА

Систейн® Гель средство офтальмологическое выпускается во флаконах по 3-15 мл.
СТЕРИЛЬНО.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

«Алкон Кузи С.А.», Испания
Alcon Cusi S.A.
Camil Fabra, 58,
08320 El Masnou, Barselona, Spain

Владелец регистрации на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:
Россия, 109004, Москва, ул. Николаямская, 54
Тел. (495) 961-13-33



www.systane.ru