

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

# СИСТЕЙН® УЛЬТРА

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/05172  
от 24 сентября 2009.

## ОПИСАНИЕ

СИСТЕЙН® УЛЬТРА средство офтальмологическое - стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 0,4%, пропиленгликоль 0,3%, гидроксипропилгуар 0,16%-0,19%, кислоту борную 0,7%, калия хлорид 0,12%, натрия хлорид 0,1%, сорбитол 1,4%, 2-амино-2-метилпропанол 0,57%, ПОЛИКВАД® (хлорид полидрония) 0,001%, кислоту хлористоводородную и/или натрия гидроксид (для доведения pH), воду очищенную (до объема 100%).

## ПОКАЗАНИЯ

СИСТЕЙН® УЛЬТРА средство офтальмологическое обеспечивает временное облегчение симптомов синдрома «сухого глаза», таких как чувство жжения и раздражение. СИСТЕЙН® УЛЬТРА средство офтальмологическое может быть использовано для смазывания и увлажнения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз дневного и пролонгированного режимов ношения. СИСТЕЙН® УЛЬТРА средство офтальмологическое увлажняет контактные линзы, уменьшая дискомфорт при ношении контактных линз, и помогает удалить отложения с их поверхности, которые могут стать причиной раздражения и/или дискомфорта.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Перед применением флакон встряхивать!  
СИСТЕЙН® УЛЬТРА средство офтальмологическое может применяться по мере необходимости на протяжении дня для увлажнения и увеличения комфорта глаз. Закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте.  
При ношении контактных линз в случае незначительного раздражения, дискомфорта или помутнения, закапайте 1-2 капли в каждый глаз и поморгайте 2-3 раза. Может быть использовано до и во время ношения контактных линз, а также после их снятия.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не прикасайтесь к кончику пипетки флакона, так как это может привести к загрязнению раствора.

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ

Безопасность и эффективность применения во время беременности и лактации не исследовались. Возможно применение при беременности и в период лактации по назначению лечащего врача, если ожидаемый эффект превышает риск развития возможных побочных эффектов.

## ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Не рекомендуется применение в детском возрасте до 18 лет, так как безопасность и эффективность применения у детей не установлены.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Следуйте рекомендациям Вашего врача-офтальмолога и инструкции по применению. При продолжающемся дискомфорте, слезотечении, изменении зрения, покраснении глаз, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.
- Храните флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Не использовать раствор, если упаковка вскрыта или повреждена.

## ФОРМА ВЫПУСКА

СИСТЕЙН® УЛЬТРА средство офтальмологическое выпускается во флаконах по 3 мл, 5 мл, 10 мл и 15 мл.

## Производитель:

Алкон Кузи С.А., Испания  
Alcon Cusi S.A.  
Camil Fabra, 58,  
08320 El Masnou, Barcelona, Spain

## Владелец регистрации на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:  
Россия, 109004, Москва, ул. Николоямская, 54  
Тел. (495) 961-13-33