

NELFILCON A
МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ОДНОКРАТНОГО ДНЕВНОГО НОШЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ И СОХРАНИТЕ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА В БУДУЩЕМ. КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ ПОДБИРАТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ. КРАЙНЕ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ И ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

Мягкие контактные линзы Dailies AquaComfort Plus

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/03096 от 23 июля 2014 года

Линзы контактные мягкие Dailies Freshlook Illuminate

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08682 от 16 сентября 2011 года

Линзы мягкие контактные сферические и торические ежедневной замены Focus Dailies

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10580 от 23 июля 2014 года

Линзы контактные мягкие цветные ежедневной замены FreshLook One-Day Color Contact Lenses

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10582 от 23 июля 2014 года

МАТЕРИАЛ И УПАКОВКА

Мягкие контактные линзы **DAILIES® AquaComfort Plus®** содержат 31% нелфилкон А (nelfilcon A) и 69% воды. Для удобства в обращении линзы имеют бледно-голубое тонирование. Краситель содержит меди фталоцианин.

Контактные линзы **DAILIES® AquaComfort Plus®** упакованы в полоски по 5 индивидуальных блистеров, которые содержат изотонический фосфатно-ацетатный буферный раствор, содержащий ГМПЦ и ПЭГ400. Раствор может содержать до 0,05% Полоксамера (Poloxamer).

Мягкие контактные линзы **DAILIES® FreshLook® Illuminate™** содержат 31% нелфилкон А (nelfilcon A) и 69% воды. Для производства цветных контактных линз используется технология точечного окрашивания следующими пигментами: железа оксиды, карбазоловый фиолетовый, фталоцианиновый синий, титана диоксид.


Контактные линзы **DAILIES® FreshLook® Illuminate™** упакованы в полоски по 5 индивидуальных блистеров, которые содержат изотонический фосфатно-ацетатный буферный раствор. Раствор может содержать до 0,02% Полоксамера (Poloxamer).

Мягкие контактные линзы **FOCUS® DAILIES®** содержат 31% нелфилкон А (nelfilcon A) и 69% воды. Для удобства в обращении линзы имеют бледно-голубое тонирование. Краситель содержит меди фталоцианин.

Контактные линзы **FOCUS® DAILIES®** упакованы в полоски по 5 индивидуальных блистеров, которые содержат изотонический фосфатно-ацетатный буферный раствор. Раствор может содержать до 0,02% Полоксамера (Poloxamer).

Мягкие контактные линзы **FreshLook® One-Day** содержат 31% нелфилкон А (nelfilcon A) и 69% воды. Для производства цветных контактных линз используется технология точечного окрашивания следующими пигментами: железа оксиды, титана диоксид, меди фталоцианин, хрома оксид, фталоцианиновый зеленый и карбазоловый фиолетовый.

Линзы **FreshLook® One-Day** упакованы в полоски по 5 индивидуальных блистеров, которые содержат изотонический фосфатно-ацетатный буферный раствор. Раствор может содержать до 0,02% Полоксамера (Poloxamer).

Линзы стерилизованы паром . Использовать только при условии неповрежденной упаковки блистера.

НАЗНАЧЕНИЕ

Контактные линзы **DAILIES® AquaComfort Plus®** предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов в режиме бодрствования), для оптической коррекции зрения лиц, не имеющих заболеваний глаз и с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения.

Контактные линзы **DAILIES® FreshLook® Illuminate™** предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов в режиме бодрствования), для оптической коррекции зрения одного или двух глаз у лиц, не имеющих заболеваний глаз и с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения.

Окрашивающий компонент в сочетании с натуральным цветом глаза создает эффект естественного изменения взгляда или его усиления.

Контактные линзы **FOCUS® DAILIES®** предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов в режиме бодрствования), для оптической коррекции зрения лиц, не имеющих заболеваний глаз и с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения.

Контактные линзы торические **FOCUS® DAILIES®** предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов в режиме бодрствования), для оптической коррекции зрения пациентов с астигматизмом, не имеющих заболеваний глаз.

Контактные линзы **FreshLook® One-Day** предназначены для ежедневного ношения (менее 24 часов в режиме бодрствования), для оптической коррекции зрения одного или двух глаз у лиц, не имеющих заболеваний глаз и с минимальной степенью астигматизма, не влияющей на качество зрения.

Окрашивающий компонент в сочетании с натуральным цветом глаза создает эффект естественного изменения взгляда или его усиления.

Все контактные линзы из материала нелфилкон А (nelfilcon A) предназначены только для однократного дневного ношения. ☒

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА

Дневные контактные линзы для ежедневного ношения из материала нелфилкон А (nelfilcon A) предназначены для однократного использования и должны выбрасываться по окончании срока ношения. Максимальное время дневного ношения контактных линз должно быть определено специалистом по контактной коррекции.

Дневные контактные линзы для ежедневного ношения из материала нелфилкон А (nelfilcon A) не требуют использования средств по уходу и очистке контактных линз. Ваши линзы должны быть выброшены каждый раз по окончании срока их использования. Каждый раз используйте новую пару контактных линз.

НЕ СПИТЕ В ЛИНЗАХ! Дневные контактные линзы для ежедневного ношения из материала нелфилкон А (nelfilcon A) не предназначены для ношения во время сна.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С КОНТАКТНЫМИ ЛИНЗАМИ

Специалист по контактной коррекции должен подробно объяснить Вам правила надевания и снятия линзы.

Всегда мойте и высушивайте руки перед манипуляциями с линзами. Аккуратно встряхните блистер с линзой перед открытием. Удалите фольгу с блистера. Вылейте раствор из блистера вместе с линзой на ладонь или, в случае необходимости, аккуратно извлеките линзу из контейнера, используя указательный палец. Убедитесь, что линза не вывернута наизнанку и что Вы достали правильную линзу для соответствующего глаза. Осмотрите линзу перед надеванием. Не используйте ее в случае повреждений.

Когда Вы снимаете линзу, убедитесь, что Ваши руки абсолютно сухие. Моргните несколько раз, затем смотря вверх, скользящим движением сдвиньте линзу вниз на белую часть глаза. Снимите линзу, аккуратно захватив ее между большим и указательным пальцами. Если возникают проблемы со снятием линзы, не пытайтесь сдавливать ткани глаза. Используйте смазывающие и увлажняющие капли (например, такие как AQuify®) и попробуйте снова через несколько минут.

- Никогда не используйте острые предметы, щипчики, маникюрные ножницы или ногти для снятия линзы или извлечения ее из контейнера или глаза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ (КОГДА НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ ЛИНЗЫ)

Контактные линзы не следует носить при наличии медицинских противопоказаний или при неблагоприятных условиях окружающей среды. Неблагоприятные условия для ношения контактных линз:

- Аллергия, воспаление, инфекция или раздражение глаза, век или прилегающих тканей.
- Состояния плохого самочувствия, такие как простуда или грипп.
- Использование некоторых лекарственных средств, включая лекарственные средства для глаз.
- Нарушение слезной пленки (сухой глаз).
- Среда с избыточной сухостью или пыленностью, делающая ношение контактных линз некомфортным.
- Занятия водным спортом без очков для плавания.

По вопросам, касающимся вышеуказанных или иных условий, проконсультируйтесь у специалиста по контактной коррекции.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Только для одноразового использования! Повторное использование может привести к заражению или износу линзы.
- **Не позволяйте** кому-либо пользоваться вашими линзами, так как это может привести к передаче микроорганизмов и, как следствие, к серьезным проблемам со здоровьем глаз.
- Ежедневно проверяйте свои глаза, чтобы убедиться, что они выглядят хорошо и чувствуют себя комфортно, а Ваше зрение является четким.
- Носителям контактных линз рекомендуется регулярно посещать специалиста по контактной коррекции.
- Не используйте контактные линзы после истечения срока их годности 🕒
- В условиях слабого освещения носители тонированных контактных линз могут почувствовать снижение четкости видения слабоконтрастных объектов.
- Сохраните информацию об оптической силе линзы для каждого глаза.
- Перед тем как надеть линзу, убедитесь, что оптическая сила линзы, указанная на упаковке, соответствует Вашему глазу.
- Всегда носите с собой запасные линзы.
- Будьте осторожны, используя мыло, лосьоны, крема, косметику или дезодоранты, так как они могут вызвать раздражение глаз в случае контакта с Вашими линзами.
- Надевайте Ваши линзы **перед** нанесением макияжа и снимайте их **до** удаления макияжа.
- При ношении контактных линз избегайте распыления аэрозолей, например лака для волос, вблизи Ваших глаз, так как это может вызвать раздражение.
- Проконсультируйтесь со специалистом по контактной коррекции при использовании контактных линз во время занятий спортом, включая плавание.
- При нахождении вблизи токсичных или раздражающих испарений, снимите линзы.
- Никогда не допускайте контакта Ваших линз с нестерильными жидкостями (включая воду из крана и слюну), так как это может привести к микробному загрязнению, а в дальнейшем к необратимым повреждениям глаза.
- Проинформируйте Вашего работодателя, что Вы носите контактные линзы, особенно если Ваша работа предусматривает использование средств защиты глаз.
- Если вскрытая линза из материала нелфилкон А (nelfilcon A) остается на воздухе вне контакта с глазом, это приводит к ее высыханию и хрупкости. В этом случае необходимо использовать новую линзу.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Хотя мягкие контактные линзы дают множество преимуществ их носителю, также возможно появление проблем, которые могут проявляться следующими признаками:

- Ощущение инородного тела в глазу
- Дискомфорт при ношении линзы
- Покраснение глаза
- Чувствительность к свету

- Ощущение жжения, покалывания, зуда в глазах, повышенное слезоотделение
- Снижение остроты зрения
- Радужные круги или ореолы вокруг источника света
- Увеличение количества отделяемого из глаза
- Дискомфорт / боль
- Сильная или непроходящая сухость глаз

Данные симптомы, оставленные без внимания, могут приводить к развитию более серьезных осложнений.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ

В случае возникновения любого из вышеперечисленных симптомов:

- **НЕМЕДЛЕННО СНИМИТЕ ЛИНЗУ (ЛИНЗЫ).**
- Осмотрите Ваши глаза в зеркале на появление неблагоприятных признаков.
- Если дискомфорт или проблема исчезли, наденьте новую свежую линзу.
- Если вышеперечисленные симптомы не исчезают после надевания новой линзы (линз), снимите линзу (линзы) **НЕМЕДЛЕННО** и срочно свяжитесь со специалистом по контактной коррекции. Возможно развитие таких серьезных осложнений, как инфекция, язва роговицы (язвенный кератит) или ирит. Эти состояния могут быстро прогрессировать и приводить к стойкой потере зрения. Лечение состояний, таких как эрозии, эпителиальное прокрашивание и бактериальные конъюнктивиты, должно быть начато как можно раньше во избежание осложнений.
- Если линза порвалась на глазу, она вызывает дискомфорт. Не паникуйте, так как попадание контактной линзы или ее части внутрь глаза невозможно. Тщательно удалите кусочки линзы, аккуратно захватив их пальцами, как при обычном снятии линзы. Если фрагменты линзы удаляются с трудом, не сдавливайте мягкие ткани глаза. Промойте раствором. Если это не помогает, обратитесь к специалисту по контактной коррекции. Специалист по контактной коррекции легко найдет линзу, используя флуоресцеин.
- Периодическая сухость может исчезнуть после того, как моргнуть несколько раз, или после использования смазывающих и увлажняющих капель. Если сухость не проходит, проконсультируйтесь со специалистом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тщательно следуя инструкциям из раздела «Что делать в случае возникновения проблем» Вы уменьшаете риск развития осложнений. Ношение контактных линз увеличивает риск глазных инфекций. Курение увеличивает риск развития язвенного кератита для носителей контактных линз.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (см. упаковку):
 “Алкон Лабораториз, Инк.”, США,
 Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway,
 Fort Worth, Texas 76134-2099, USA.



“СИБА ВИЖН Корпорэйшн”, США,
 CIBA VISION Corporation, 11460/11440 Johns
 Greek Parkway, Duluth, Georgia 30097, USA.

ПРОИЗВЕДЕНО (см. упаковку):
 Alcon Laboratories Inc., 6201 South Freeway, Fort
 Worth, TX, 76134-2099, USA.

Или
 CIBA VISION GmbH, Industriering 1, D-63868
 Grosswallstadt, Germany.

Или
 Alcon Laboratories Inc., 11440 Johns Creek
 Parkway, Duluth, GA, USA 30097.

Или
 CIBA VISION ASIAN MANUFACTURING AND
 LOGISTICS Pte. Ltd., 133 Tuas South Avenue 3,
 Singapore 637550.

**АВТОРИЗОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕС:**

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:

Россия, 109004, Москва, ул. Николаямская, 54
Тел. (495) 961-13-33

Символы, используемые для спецификации контактных линз:

| | |
|------|---|
| DIA | Диаметр |
| BC | Базовая кривизна (задний центральный оптический радиус) |
| PWR | Сила (задняя) вершинная рефракция) |
| CYL | Цилиндр |
| AXIS | Ось |
| L | Левая |
| R | Правая |

Дата составления:

2015-04