

DRAWING INFORMATION	
DWG NUMBER:	L11715A
DWG DESC.:	INSVND 3 5/8" X 12 15/16"
	FLD TO 3 5/8" X 2 3/16"DROP-IN
DWG DATE:	08/26/11
REV DESC.:	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCE: ±1/32"

LEGEND

FOLD



NO TEXT



ALCON DWG. NO. &
CONTROL DATE -
DIRECTION DETER-
MINED BY COPY.



NO TEXT, COLOR OR
COATING.



RESERVED FOR BAR
CODE

0795

Инструкция по применению

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist с контейнером для хранения контактных линз

Прочтите внимательно и сохраните эту Инструкцию по применению для использования в будущем.

Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2011/10610 от 15 сентября 2011 года

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist с контейнером для хранения контактных линз:

- 16 часов увлажнения линз обеспечивают комфортное ношение и увлажнение контактных линз от момента их надевания до снятия
- Обеспечивает очищение, ополаскивание, промывание, дезинфекцию, хранение
- Обеспечивает удаление протеиновых отложений
- Предотвращает образование липидных отложений
- Для всех типов силикон-гидрогелевых и мягких контактных линз

СОСТАВ:

Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist – стерильный, буферный, водный раствор, содержащий натрия цитрат 6,5 мг/мл; натрия хлорид 1,0 мг/мл; борную кислоту 6,0 мг/мл; сорбитол 12,0 мг/мл; аминометилпропанол 4,2 мг/мл; динатрия эдетат 0,5 мг/мл; увлажняющие агенты TETRONIC® 1304* 0,4 мг/мл и HydraGlyde® Moisture Matrix [EOVO – 41™ –полиэтиленоксид-полибутиленоксид] 0,4 мг/мл; консерванты ПОЛИКВАД® (поликватерний-1) 0,01 мг/мл и АЛДОКС (миристиамидопропил диметиламин) 0,006 мг/мл; натрия гидроксид и/или хлористоводородную кислоту до доведения pH, воду очищенную до 1 мл. HydraGlyde® Moisture Matrix представляет собой запатентованный многофункциональный блок-сополимер,



разработанный для увлажнения и смазывания силикон-гидрогелевых контактных линз.

ДЕЙСТВИЕ:

При использовании в соответствии с Инструкцией по применению **раствора многофункционального для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist:**

- Очищает, удаляя липидные и протеиновые отложения в процессе дезинфекции и хранения контактных линз.
- Биосовместимые компоненты ПОЛИКВАД® и АЛДОКС действуют против патогенных микроорганизмов (бактерии, грибы и *Acanthamoeba*).
- Используется для ополаскивания и увлажнения всех типов силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз.
- Разработан для дезинфекции и хранения линз до 30 дней после дезинфекции.

Применение отдельного ферментного очистителя не требуется при ежедневном использовании **раствора многофункционального для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist**. Не храните ваши контактные линзы в солевом растворе вместо **раствора многофункционального для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist**. Солевой раствор не обеспечивает дезинфекцию линз.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Используется для ежедневной очистки, восстановления, ополаскивания, удаления липидных и протеиновых отложений, предотвращения отложения липидов, химической (не термической) дезинфекции, и хранения силикон-гидрогелевых и мягких (гидрофильных) контактных линз в соответствии с рекомендациями специалиста по контактной коррекции.

Преимущества увлажнения, смазывания и очистки контактных линз Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist:

- Обеспечивает увлажнение линз в течение 16 часов для комфортного ношения в течение всего дня. Увлажняющее вещество HydraGlyde® Moisture Matrix действует независимо от слезной пленки, удерживая влагу на контактных линзах и обеспечивая комфорт с момента надевания линз до их снятия.
- Сохраняет постоянное смягчение и увлажнение, что позволяет векам скользить по поверхности линзы без раздражения.
- Обеспечивает увлажнение линзы в течение всего дня.
- Связывается с сухими участками линзы, блокируя осаждение липидных и протеиновых отложений, тем самым очищая и освежая линзы.
- Удаляет липидные и протеиновые отложения с чистых и свежих линз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам **раствора многофункционального для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist**.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Полностью удалите материалы упаковки перед использованием.
- Перед тем как снять или надеть контактные линзы, обязательно вымойте и высушите руки.
- Очищайте, ополаскивайте, промывайте и дезинфицируйте контактные линзы каждый раз, как Вы их снимаете.
- Во избежание ошибок, соблюдайте одну и ту же последовательность: всегда сначала берите левую или правую контактную линзу.
- После использования следует вылить раствор из контейнера, ополоснуть контейнер свежим **раствором многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist** и дать контейнеру высохнуть.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ ПО ОЧИСТКЕ, ОПОЛАСКИВАНИЮ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И УДАЛЕНИЮ ПРОТЕИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

- Тщательно ополосните каждую сторону контактной линзы **раствором многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist**. Потрите каждую линзу в течение 20 секунд.

- Промойте каждую сторону линзы в течение 10 секунд под непрерывной струей **раствора многофункционального для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist**.
- Наполните контейнер для хранения контактных линз свежим **раствором многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist**. Оставьте контактные линзы в закрытом контейнере на ночь или минимум на 6 часов. После этой процедуры контактные линзы готовы к использованию.

Если какие-либо частицы остались на контактных линзах, ополосните линзы **раствором многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist** перед тем, как надеть их. Контактные линзы можно хранить в закрытом контейнере с **раствором многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist** до 30 дней. Если контактные линзы хранятся дольше, они должны подвергаться очистке и дезинфекции свежим **раствором многофункциональным для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist** и непосредственно перед использованием.

Всегда следуйте советам специалиста по контактной коррекции. Не следует изменять схемы ухода за линзами или раствор для ухода за линзами без консультации специалиста по контактной коррекции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Следуйте рекомендациям специалиста по контактной коррекции и инструкциям по правильному использованию контактных линз и применению средств по уходу за контактными линзами, включая контейнер. В случае продолжающегося дискомфорта, слезотечения, изменения зрения или покраснения глаз, НЕМЕДЛЕННО снимите контактные линзы и обратитесь к врачу для предупреждения более серьезных последствий.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Всегда используйте только свежий **раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist**. Не используйте раствор в контейнере повторно.
- Чтобы избежать загрязнения, не прикасайтесь к каким-либо поверхностям кончиком флакона.
- Закрывайте флакон после каждого использования.
- Храните при комнатной температуре.
- Храните флакон плотно закрытым.
- Не используйте раствор после окончания срока годности, указанного на упаковке.
- Не используйте раствор более 6 месяцев после первого вскрытия флакона.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор для термической дезинфекции.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА:

СТЕРИЛЬНО.
Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist стерилизуется фильтрацией, поставляется в пластиковых флаконах от 60 мл до 470 мл. По 1 пластиковому флакону с контейнером для хранения контактных линз и с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

“Алкон Лабораториз”, Инк., США
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway,
Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA

Владелец регистрации на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий: 109004, Москва, ул. Николоямская, 54
Тел. (495) 961-13-33

*TETRONIC® 1304 - торговая марка корпорации BASF.

©2012 Novartis

9007366-1211

FRONT SIDE

BACK SIDE
(MIRROR OF FRONT SIDE)



Alcon GLOBAL GRAPHICS		ARTIST	REV	REASON FOR CHANGE	DATE
FILE NAME: 9007366 I OFPM RUS		J. Yonkman		New	01/05/12
ARTIST APPROVAL:		J. Yonkman	A	Text Revisions	02/07/12
CONCURRER:		S. Ross	B	Text Revision	02/16/12
PRINTING COLORS		J. Yonkman	C	Text Revisions	03/20/12
BLACK					
VARNISH					
NON-PRINTING COLORS					
NOTATIONS-DIE VINYL					
PREPRESS USE ONLY					
PREPRESS TECH:					
DATE:					

CORP-000107